

FILLMED
LABORATOIRES



ART FILLER®

FILLMED

LABORATOIRES

4	STORIA
10	UN APPROCCIO PRO-AGING A 360°
12	TECNOLOGIA TRI-HYAL®
16	LA GAMMA ART FILLER®
18	ART FILLER® UNIVERSAL
22	ART FILLER® FINE LINES
26	ART FILLER® VOLUME
30	ART FILLER® LIPS / LIPS SOFT
38	BIONUTRILIFT® CANNULAS
40	I PROTOCOLLI FILLMED

we
c
i
D
N
I

BELLEZZA AUTENTICA E SICURA

Da oltre 40 anni, Laboratoires FillMed è pioniera nel fornire soluzioni nel campo della Medicina Estetica, sviluppando prodotti per le esigenze dei pazienti e promuovendo un approccio pro-ageing olistico. L'autenticità e la sicurezza dei prodotti sono requisiti imprescindibili per i clienti.

Siamo consapevoli dell'importanza di offrire ai pazienti solo prodotti di ottima qualità, per questo abbiamo implementato PROOFTAG: un sistema di autenticazione globalmente riconosciuto per prevenire e proteggere, dalla frode e dalla contraffazione, tutti i nostri prodotti.

Questo sistema consente il tracciamento dei nostri prodotti, dalla fase di produzione a quella di utilizzo, garantendone l'autenticità.





MASSIMA SICUREZZA

Controllo sistematico della qualità
Verifica di ogni siringa
Rispetto dei più elevati Standard
Internazionali ISO 14 644, ISO 13 485

UNO STABILIMENTO ALL'AVANGUARDIA

Solo poche fabbriche al mondo sono in grado di produrre soluzioni iniettabili di acido ialuronico. Un'architettura 100% su misura per assicurare il controllo di tutti i processi.

La storia ha inizio con il Dr. Michel Tordjman, medico estetico francese affascinato dal mondo della biologia cellulare, che nel 1978 ha creato ed utilizzato per primo NCTF® (New Cellular Treatment Factor). Da allora Laboratoires FillMed sviluppa trattamenti estetici, cosmetici e anti-età, utilizzando acido ialuronico e ingredienti attivi estremamente performanti.



CORREGGERE LE RUGHE

CON ACIDO IALURONICO

Fattori come l'età, l'esposizione al sole, lo stress, il fumo e l'inquinamento favoriscono i segni dell'invecchiamento cutaneo.

L'acido ialuronico che si trova naturalmente nel nostro corpo diminuisce nel tempo. A partire dai 40 anni, infatti, la riduzione sostenuta dell'acido ialuronico è una delle cause principali dell'invecchiamento della pelle e con il passare del tempo, a volte, **sembra che il proprio viso non rifletta più la propria personalità.**



RIAPPROPRIARSI DELLA STIMA IN SÉ

Nell'indagine ART*, Laboratoires FillMed ha dimostrato che le iniezioni di filler dermici hanno un impatto psicologico positivo nei pazienti. Infatti, il **73% dei pazienti vede il proprio aspetto migliorato, il 64% si sente più sicuro e il 55% si sente più dinamico**.**

Un'alta percentuale di pazienti ha affermato un miglioramento della propria immagine professionale e delle relazioni di lavoro.

La maggior parte di loro ha dichiarato di avere un miglioramento della qualità della pelle, un aspetto più fresco e fotogenico. Dopo il trattamento, i pazienti si sentono più giovani della loro età effettiva, in media da 2 a 3 anni.

* March 2016 Fillmed Survey su 1000 donne in Francia.

** 934 persone intervistate in Europa nel 2017 dai loro medici dopo l'iniezione di almeno uno dei prodotti della gamma FILLMED ART FILLER® secondo il questionario di autostima di Rosenberg.



UN APPROCCIO PRO-AGING A 360°



ART FILLER®

5 TEXTURE MODELLABILI PER OGNI TIPO DI ESIGENZA
FINE LINES, UNIVERSAL, VOLUME, LIPS SOFT & LIPS

LA BELLEZZA È UN'ARTE,
NOI NE ABBIAMO FATTO
UNA SCIENZA

Dai Laboratoires FillMed, ecco la **TECNOLOGIA TRI-HYAL®** che combina tre tipi di acido ialuronico + lidocaina 0,3% confezionata in cinque ART FILLER®, ognuno con una texture specifica per ogni sede di iniezione e finalità.

Test di laboratorio hanno dimostrato che i prodotti della gamma ART FILLER® stimolano i tessuti a sintetizzare il collagene (misurazione con ultrasuoni ad alta frequenza) e le fibre elastiche (misurazione con espianti di pelle).



ART FILLER® TECNOLOGIA TRI-HYAL®

La gamma ART FILLER® beneficia di un'innovazione nel campo della ricerca e dello sviluppo: la TECNOLOGIA TRI-HYAL®.

I gel sono composti da acido ialuronico di origine non animale e presentano un perfetto equilibrio tra tre tipi di acido ialuronico: **acido ialuronico libero**, **acido ialuronico a catene lunghe** e **acido ialuronico a catene molto lunghe**.

Ogni prodotto della gamma è stato sviluppato tenendo conto di un preciso obiettivo di trattamento.


3 TIPI DI ACIDO IALURONICO

INTRECCIO NATURALE E FLESSIBILE

CATENE MOLTO LUNGHE 3,5 mDa

CATENE LUNGHE 1 mDa

ACIDO IALURONICO LIBERO

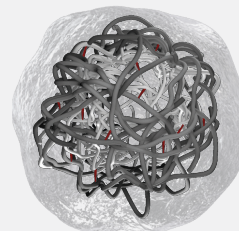

TEXTURE OTTIMIZZATE

RAPPORTO CATENE LUNGHE/MOLTO LUNGHE

Intreccio 3D naturale


GRADO DI RETICOLAZIONE

Concentrazione ottimizzata di BDDE

CONCENTRAZIONE DI HA LIBERO


Comfort durante l'iniezione e risultati naturali

3 POTERI DI CORREZIONE

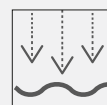

MODELLANTE

Facile da modellare:
capacità di
modellamento del gel

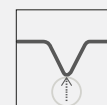

VOLUMIZZANTE


Elasticità: capacità
di resistenza del gel
alle deformazioni



LEVIGANTE

Viscosità: capacità
del gel di integrarsi
uniformemente nei tessuti

5 TEXTURE MODELLABILI PER OGNI TIPO DI ESIGENZA

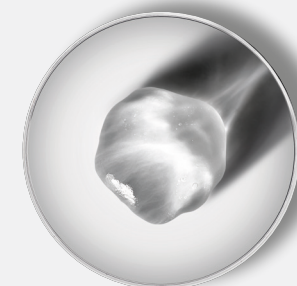

FINE LINES

LEVIGANTE E IDRATANTE


Rughe sottili e superficiali



UNIVERSAL

RIMPOLPANTE

Rughe medie e profonde

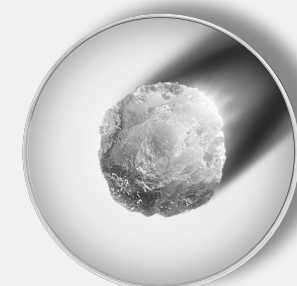

VOLUME

VOLUMIZZANTE E RIMODELLANTE


Rughe profonde e volumi del viso



LIPS SOFT

RIMPOLPANTE E IDRATANTE

Rughe periorali e volume soft

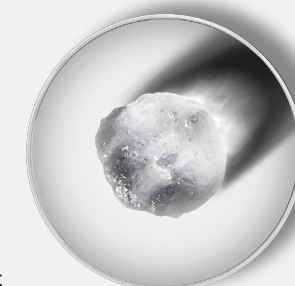


LIPS

VOLUMIZZANTE E RIMODELLANTE

Volume e proiezione

PERFORMANCE DI LUNGA DURATA COMPROVATA A 18 MESI

Nei 18 mesi successivi all'utilizzo del prodotto **ART FILLER® UNIVERSAL**, non è stata segnalata la comparsa di noduli infiammatori nè si è verificato un cedimento della correzione effettuata. Un risultato verificato con misurazioni strumentali (profilometria e ultrasuoni ad alta frequenza) unite a punteggi clinici.

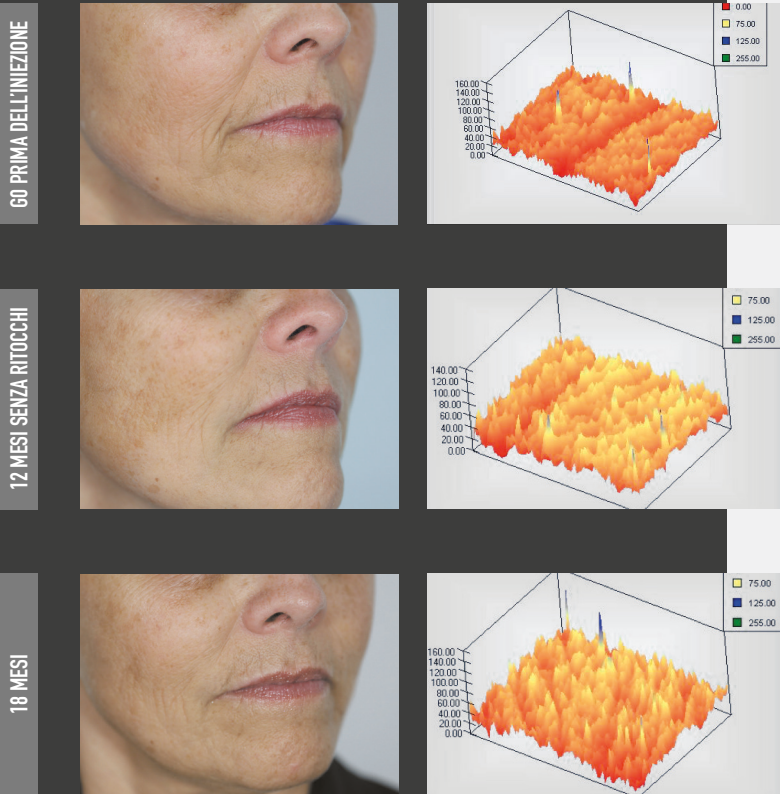

SITUAZIONE
PRE-INIEZIONE

100% DEI SOGGETTI*
CORREZIONE MANTENUTA


98,4% DEI SOGGETTI*
CORREZIONE MANTENUTA

* N=32, 64 mezzi volti, valutazione della ruga nasogeniena con punteggio Lemperle a 12 mesi rispetto al giorno 0 (valutazione indipendente eseguita da GREDECO), riduzione di 1 o più punti se comparato al punteggio iniziale.






ELEVATA TOLLERABILITÀ TESTATA

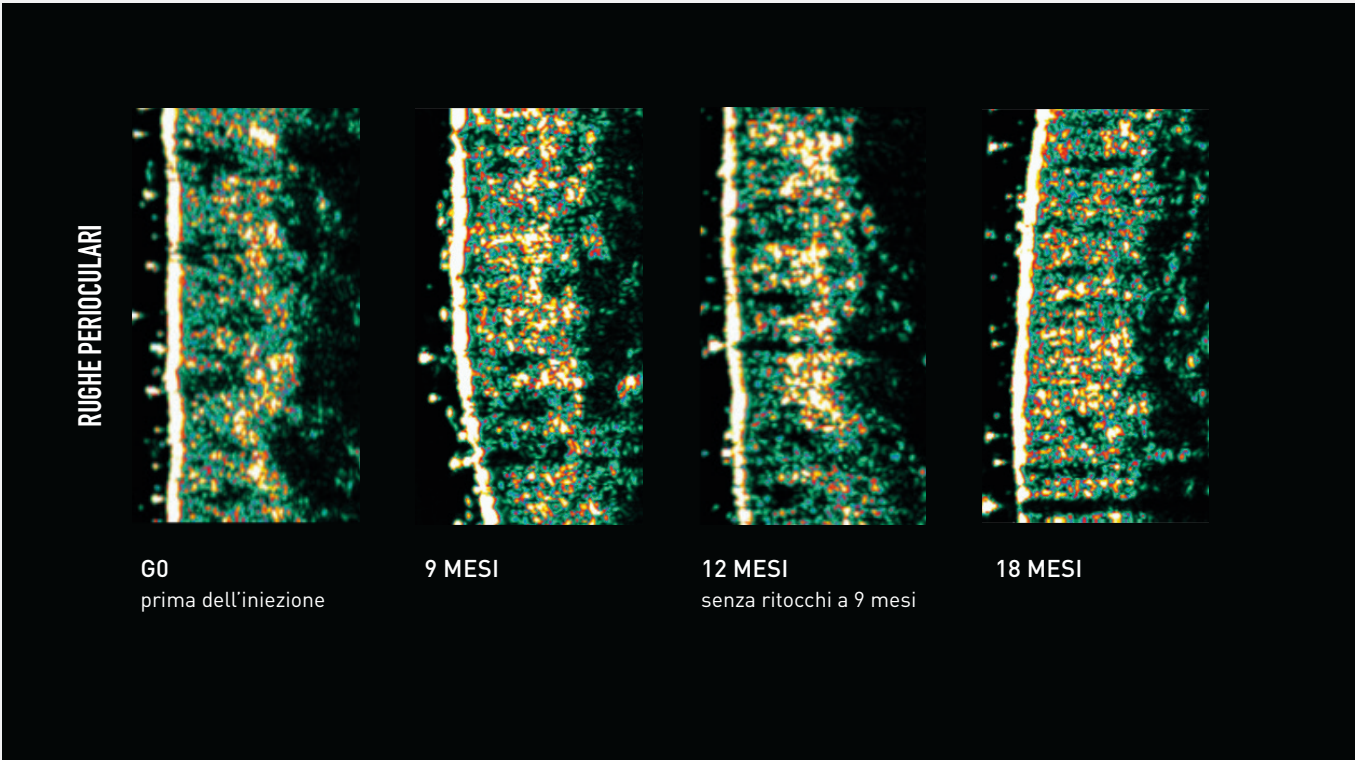ASSENZA DI GRANULOMI VERIFICATA A 18 MESI


La valutazione a 18 mesi con ultrasuoni ad alta frequenza ha dimostrato l'assenza di zone iperecogene e dunque di granuloma, oltre l'assenza di noduli infiammatori.



LA GAMMA
ART FILLER®
COLLECTION

	CORREZIONE HAUT SCULPTURE			LABBRA	
					
	FINE LINES	UNIVERSAL	VOLUME	LIPS SOFT	LIPS
INDICAZIONE	RUGHE SOTTILI E SUPERFICIALI	RUGHE DA MEDIE A PROFONDE	RUGHE PROFONDE E VOLUMI DEL VISO	RUGHE PERIORALI E VOLUME SOFT	VOLUME E PROIEZIONE LABBRA
CONCENTRAZIONE HA	20 mg/mL	25 mg/mL	25 mg/mL	25 mg/mL	25 mg/mL
RAPPORTO: CATENE MOLTO LUNGHE/ CATENE LUNGHE	●○○○	●●○○	●●●●	●●○○	●●●○
TASSO DI RETICOLAZIONE	●○○○	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○
HA LIBERO*	●●●●	●●●○	●○○○	●●●○	●●○○
LIDOCAINA	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
CONFEZIONE	2 x 1 mL	2 x 1.2 mL	2 x 1.2 mL	1 x 1 mL	2 x 1 mL
AGO	4 x 30G½"	4 x 27G½"	4 x 27G½"	2 x 30G½"	4 x 27G½"

AREA INIETTIVA

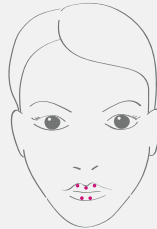

CORREZIONE RUGHE HAUTE SCULPTURE



ART FILLER®
UNIVERSAL | 

RUGHE DA MEDIE A PROFONDE

La formulazione che valorizza il viso - con i protocolli Medical Highlighting™ e 2.4 PRO D-LIGHT - e lo ridefinisce in sinergia con la Soluzione Polirivitalizzante all'interno del protocollo Bionutrishape™.

ART FILLER®
UNIVERSAL



FORMULA

CONCENTRAZIONE DI HA (MG/ML)	GRADO DI RETICOLAZIONE	HA LIBERO	LUNGHEZZA DELLE CATENE DI HA	LIDOCAINA
25	●●●○	●●●○	●●○○	0.3%

CARATTERISTICHE DEL GEL

Levigante e rimodellante.

AREA DI INIEZIONE

Rughe nasolabiali, linee della marionetta.



LIVELLO DI INIEZIONE

Derma da medio a profondo


Confezione: 2 siringhe x 1.2 mL + 4 aghi 27G½

STUDIO CLINICO¹

AD ALTA PERFORMANCE

Art Filler® Universal mostra un **aumento significativo dello spessore e della densità cutanea dopo 18 mesi¹**.

Lo studio con ultrasuoni ad alta frequenza ha mostrato un aumento significativo dello spessore e della densità della pelle dopo 18 mesi di iniezioni intradermiche di Universal nelle pieghe nasolabiali².

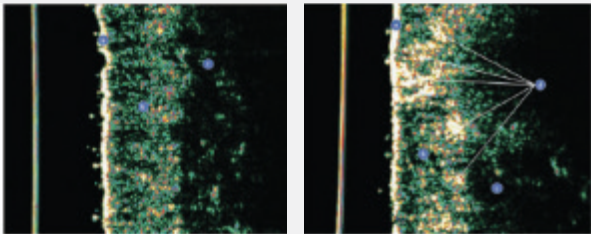

[1] Trevidic, P. et al., (2020) "Objective 18-month comparison of the tolerability of 2 dermal fillers formulated with Tri-Hyal Technology", Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open, 8(12): pp. e3274.

[2] Questo è un articolo ad accesso libero distribuito secondo i termini della Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives License 4.0 (CCBY-NC-ND), dove è consentito scaricare e condividere l'opera a condizione che sia adeguatamente citata. L'opera non può essere modificata in alcun modo o utilizzata a fini commerciali senza l'autorizzazione della rivista.

DONA PROIEZIONE
E RIPRISTINA
I VOLUMI PERSI

Ripristina il volume perso a seguito dell'invecchiamento della pelle, nelle zone di zigomi, mento e tempie. È inoltre indicato per ridefinire le guance e migliorare la qualità della pelle.

CORREZIONE RUGHE HAUTE SCULPTURE



ART FILLER® FINE LINES

RUGHE SOTTILI E SUPERFICIALI
Ideale per levigare e rimpolpare le zone delicate, trova la sua migliore applicazione nel protocollo fronte in combinazione con ART FILLER® VOLUME.

ART FILLER® FINE LINES



FORMULA

CONCENTRAZIONE DI HA (MG/ML)	GRADO DI RETICOLAZIONE	HA LIBERO	LUNGHEZZA DELLE CATENE DI HA	COESIVITÀ	LIDOCAINA
20	●○○○	●●●●	●○○○	●○○○	0.3%

CARATTERISTICHE DEL GEL

Texture morbida, ottima integrazione nei tessuti. Indicato per idratare e riempire aree delicate e migliorare la skin quality.

AREA DI INIEZIONE

Rughe sottili, rughe superficiali e piccole pieghe cutanee delle zampe di gallina, della fronte, del labbro superiore e delle guance.



LIVELLO DI INIEZIONE


Derma superiore

Confezione: 2 siringhe x 1 mL + 4 aghi da 30G½

STUDIO CLINICO¹ AD ALTA PERFORMANCE

Valutazione con ultrasuoni dermici ad alta frequenza.
Nessun granuloma rilevato nell'arco di 18 mesi.
Prima gamma di prodotti HA con studio di tolleranza IN VIVO per 18 mesi.

Lo studio con ultrasuoni ad alta frequenza ha mostrato un aumento significativo dello spessore e della densità della pelle dopo 18 mesi di iniezioni intradermiche di Art Filler® Fine Lines nella zona "zampe di gallina"².

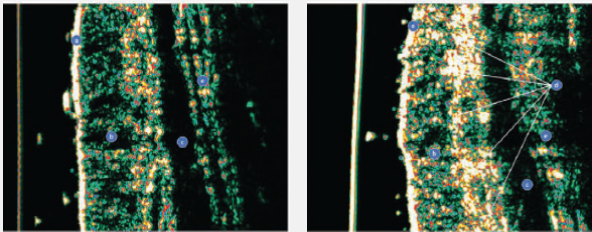

[1] Grand-Vincent, A., et.al. (2017) "Valutazione clinica di una formulazione mesoterapica per il ringiovanimento della pelle in volontari sani", Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 7(4): pp. 291-305.
[2] Trevidic, P. et al., (2020) "Confronto oggettivo a 18 mesi della tollerabilità di 2 filler dermici formulati con la tecnologia Tri-Hyal", Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open, 8(12): pp. e3274. Questo è un articolo ad accesso libero distribuito secondo i termini della Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives License 4.0 (CCBY-NC-ND), dove è consentito scaricare e condividere l'opera a condizione che sia adeguatamente citata. L'opera non può essere modificata in alcun modo o utilizzata a fini commerciali senza l'autorizzazione della rivista.


PROTOCOLLO FRONTE

Per pazienti con inestetismi sulla fronte, che desiderano risultati naturali, evitando un effetto "congelato".



VIDEO DISPONIBILE SU
FILLMED E-ACADEMY

TECNICA INIETTIVA

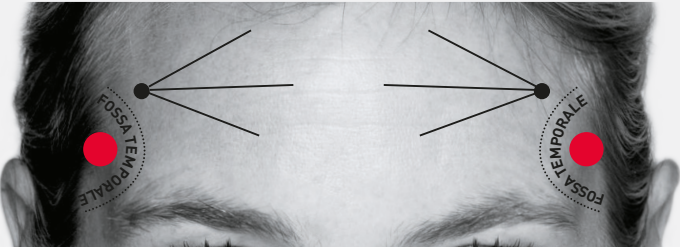

● ART FILLER® VOLUME ← ART FILLER® FINE LINES

RISULTATI

RISULTATI NATURALI
L'espressività del viso rimane naturale, senza effetto "frozen"
ELEVATA TOLLERABILITÀ E SICUREZZA³
Oltre i 18 mesi
RISULTATI DURATURI³
Oltre i 18 mesi



PRIMA



DOPO

ROUTINE CONSIGLIATA




POST-TRATTAMENTO B3-RECOVERY CREAM
Crema lenitiva dalla texture ricca, contenente 1% di vitamina B3 e 2% H-urea.



ROUTINE QUOTIDIANA RE-TIME SERUM
Siero anti-aging globale, contenente 0.1% di retinolo. Applicare dopo la ricostituzione della barriera cutanea.

[3] Sperimentazione clinica a lungo termine AF4 durata 18 mesi, multicentrica presso 15 centri in Francia, 2019-2021, 196 soggetti, età media 53.9 anni. Iniezione di ART FILLER® sulla fronte (84 soggetti), zampe di gallina (81 soggetti), pieghe sulle guance (37 soggetti) e labbra superiori (75 soggetti). ART FILLER® una gamma di dispositivi medici iniettabili completi della marcatura CE(CE0123). Consultare le istruzioni per l'uso di ogni prodotto per ulteriori informazioni. Le CANNULE BIONUTRILIFT® sono dispositivi medici sterili e monouso, di classe IIa, da usarsi solo da parte di medici certificati (CE0459). Ogni distributore o concessionaria dovr adattare il presente documento alle normative locali. Contatto di vigilanza (comunicazioni di effetti collaterali): vigilance@fillmed.com.

RIPRISTINARE LA V SHAPE DEL VISO

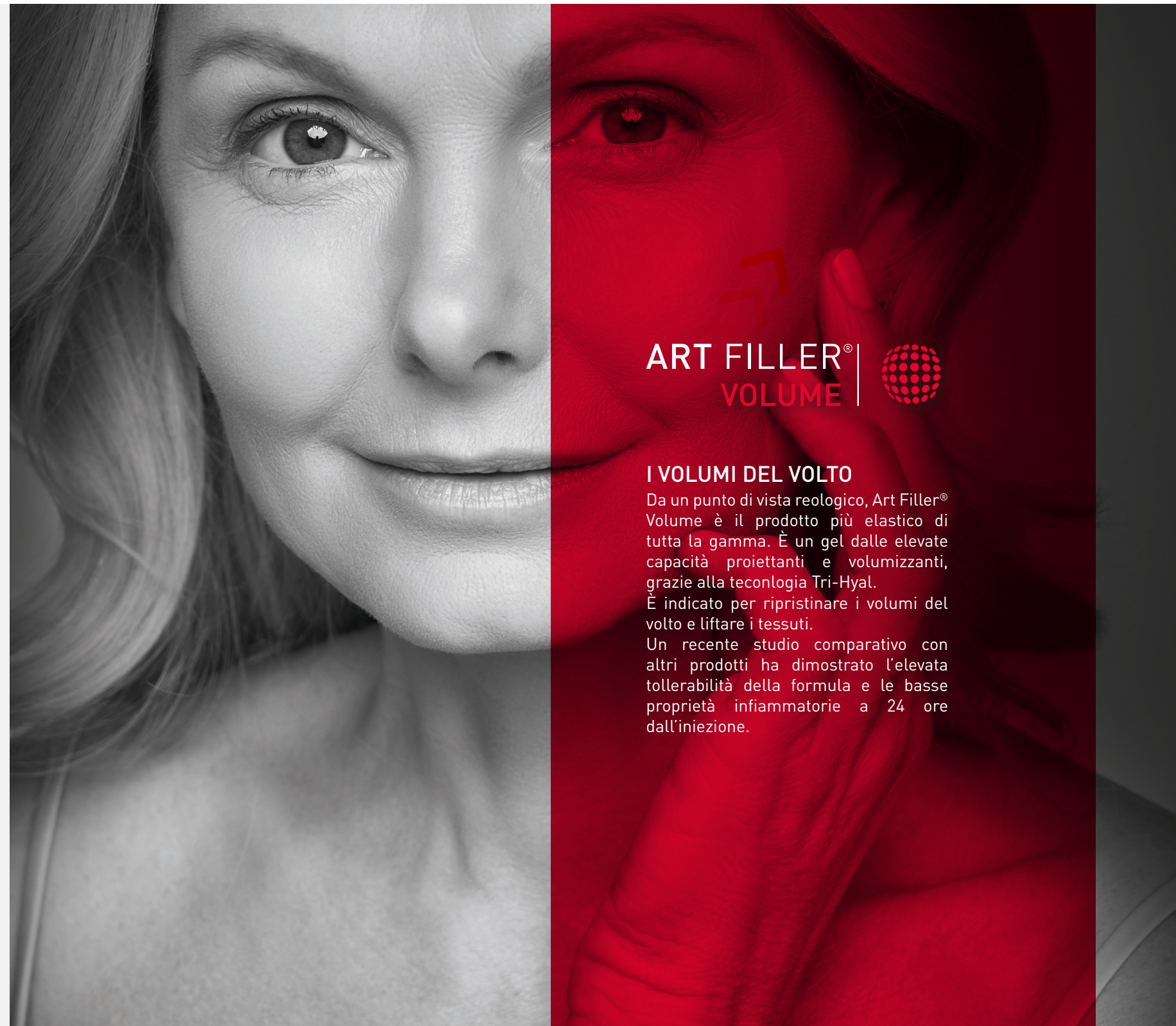

ART FILLER®
VOLUME




I VOLUMI DEL VOLTO

Da un punto di vista reologico, Art Filler® Volume è il prodotto più elastico di tutta la gamma. È un gel dalle elevate capacità proiettanti e volumizzanti, grazie alla tecnologia Tri-Hyal.

È indicato per ripristinare i volumi del volto e liftare i tessuti.

Un recente studio comparativo con altri prodotti ha dimostrato l'elevata tollerabilità della formula e le basse proprietà infiammatorie a 24 ore dall'iniezione.

ART FILLER® VOLUME

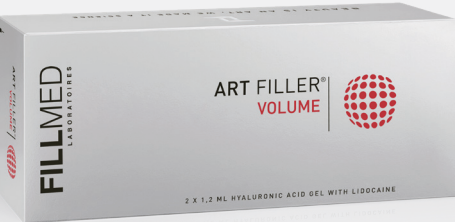

FORMULA


CONCENTRAZIONE DI HA (MG/ML)	GRADO DI RETICOLAZIONE	HA LIBERO	LUNGHEZZA DELLE CATENE DI HA	COESIVITÀ	LIDOCAINA
25	●●●●	●○○○	●●●●	●●●●	0.3%

CARATTERISTICHE DEL GEL

Volumizzante e rimodellante.

AREA DI INIEZIONE

Tempie, zigomi e linea mandibolare.

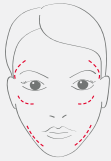

LIVELLO DI INIEZIONE

Iniezioni sottocutanee, sovraparietali o nel derma profondo

Confezione: 2 siringhe x 1.2 mL + 4 aghi 27G½

DOMINO EFFECT

Ripristina la V SHAPE e la naturale geometria del viso con effetto collaterale positivo sulle zone circostanti.



VIDEO DISPONIBILE SU
FILLMED E-ACADEMY




TECNICA INIETTIVA PER ZONA

Le tre zone principali sono: temporale, zigomatica e mandibolare. Per innescare un effetto collaterale positivo e per riportare i tessuti del viso nella loro posizione originale, è fondamentale iniziare dall'area superiore del volto.



VIDEO DISPONIBILE SU
FILLMED E-ACADEMY

TECNICA INIETTIVA

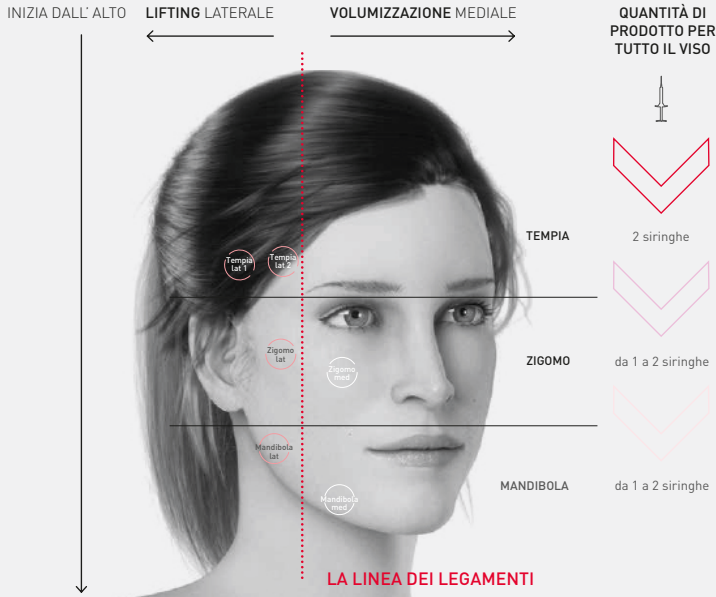

RISULTATI

- EFFETTO LIFTING IMMEDIATO
- RICOSTITUIRE LA NATURALE GEOMETRIA DEL VISO
- RIPRISTINO DELLA V SHAPE
- RISULTATO NATURALE



[1] Test clinico comparativo a lungo termine per 18 mesi con AF3 18, multicentrico presso 5 centri in Francia, 2019-2021, 98 soggetti, media 54.7 anni. Iniezione di ART FILLER® VOLUME sulle tempie (33 soggetti). Iniezione di ART FILLER® VOLUME sulla mandibola (72 soggetti). Iniezione di ART FILLER® VOLUME sulla parte mediale del viso (56 soggetti).

RIDISEGNARE LE LABBRA




ART FILLER® LIPS SOFT





Per pazienti che desiderano un **risultato estetico naturale**. Indicato per attenuare i segni dell'invecchiamento nella zona periorale, per ricostituire il volume o per ridefinire il contorno del vermiglio o del labbro pallido.

ART FILLER® LIPS

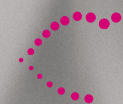


Ideale per chi desidera avere **labbra carnose**, o per chi vorrebbe correggere una specifica zona del terzo inferiore, come mento e pieghe nasolabiali. Utilizzato per correggere la perdita di volume o di sporgenza del vermiglio, il mento sfuggente e solchi nasolabiali molto profondi.

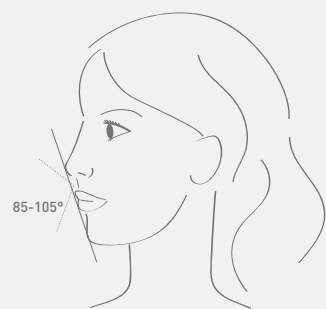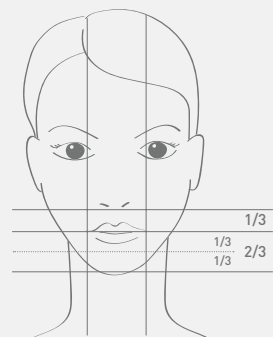

OTTIMIZZARE LE PROPORZIONI IL SEGRETO PER LABBRA IDEALI

Il segreto è rispettare le proporzioni e il carattere del viso, perciò è fondamentale avere un approccio anatomico preciso.

1. Rughe nasolabiali pronunciate
2. Linee periorali del labbro pallido
3. Filtro appiattito
4. Arco di Cupido attenuato
5. Angoli delle labbra rilassati
6. Mancanza di volume e sporgenza del vermillion
7. Rughe della marionetta o mento labiali pronunciate

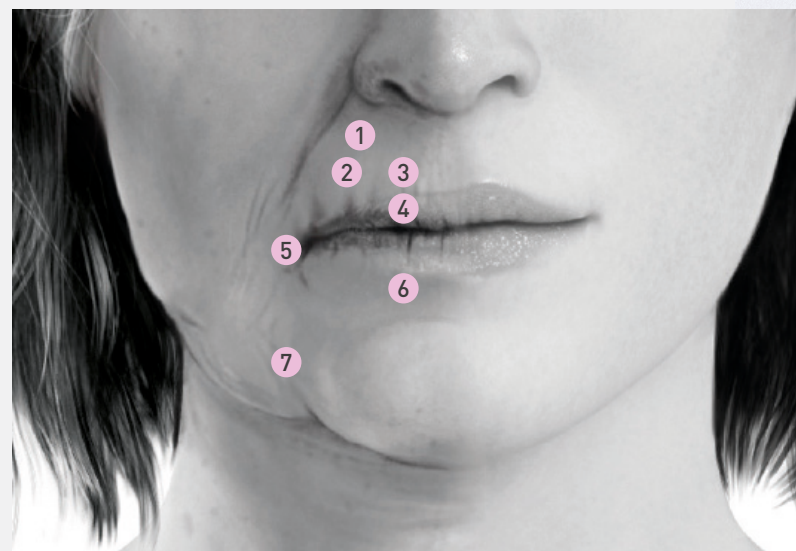

16%

Mancanza di volume delle labbra¹

26%

Linee e rughe periorali¹

7%

Contorno labiale poco definito¹

RIDEFINIRE LA ZONA PERIORALE

COME ADATTARE L'APPROCCIO
ALLE ESIGENZE DEL PAZIENTE

- 1 Approccio globale all'armonia del viso
- 2 Comprensione delle aspettative del paziente
- 3 Scegliendo la soluzione iniettabile corretta, secondo il profilo reologico specifico

[1] Studio Arcane 2018 - indagine quantitativa su 8.646 donne (18-75 anni), 824 delle quali si erano già sottoposte a trattamenti estetici.

ART FILLER®
LIPS SOFT



FORMULA

CONCENTRAZIONE DI HA (MG/ML)	GRADO DI RETICOLAZIONE	HA LIBERO	LUNGHEZZA DELLE CATENE DI HA	LIDOCAINA
25	●●●○	●●●○	●●○○	0.3%

CARATTERISTICHE DEL GEL

Rimodellante e rimpolpante

AREA DI INIEZIONE

Volume del vermiglio, contorno del vermiglio/del labbro,
zona periorale.



LIVELLO DI INIEZIONE

Derma medio-profondo

Confezione: 2 siringhe x 1 mL + 2 aghi da 30G½

LEVIGANTE,
VOLUMIZZANTE
E MODELLANTE

Indicato per aumentare il volume delle labbra e migliorarne il contorno e per riempire le pieghe nasolabiali medie e profonde, con o senza linee della marionetta, mediante iniezione nel derma medio e profondo. Prodotto coeso, facile da modellare.



VIDEO DISPONIBILE SU
FILLMED E-ACADEMY



CONTORNO
E VOLUME

Ricostituzione del volume, contorno del
vermiglio, segni d'invecchiamento.



AREE DI INIEZIONE

VOLUME
bolo



CONTORNO
tecnica lineare



PROIEZIONE

—

ZONA PERIORE
retrograda



MENTO

—

RISULTATI

PAZIENTE DI 57 ANNI

- EFFETTO LIFTING IMMEDIATO
- RICOSTITUZIONE NATURALE DELLA GEOMETRIA DEL VISO
- RIPRISTINO DELLA V SHAPE
- RISULTATO NATURALE



PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO

ART FILLER®
LIPS



FORMULA

CONCENTRAZIONE DI HA (MG/ML)	GRADO DI RETICOLAZIONE	HA LIBERO	LUNGHEZZA DELLE CATENE DI HA	COESIVITÀ	LIDOCAINA
20	●○○○	●●●●	●○○○	●○○○	0.3%

CARATTERISTICHE DEL GEL

Texture morbida, ottima integrazione nei tessuti. Indicato per idratare e riempire aree delicate e migliorare la skin quality.

AREA DI INIEZIONE

Rughe sottili, rughe superficiali e piccole pieghe cutanee delle zampe di gallina, della fronte, del labbro superiore e delle guance.



LIVELLO DI INIEZIONE

Derma superiore

Confezione: 2 siringhe x 1 mL + 4 aghi da 30G½

TRATTAMENTO
DELLE RUGHE
NASOGENIENE

Uno studio clinico multicentrico, sull'efficacia e sicurezza di filler a base di acido ialuronico con tecnologia Tri-Hyal, per il trattamento delle labbra e della zona periorale



VIDEO DISPONIBILE SU
FILLMED E-ACADEMY



VOLUME
E PROIEZIONE

Volume del vermiglio, mento sfuggente e profondi solchi nasolabiali.



AREE DI INIEZIONE

VOLUME
bolo



CONTORNO

-

PROIEZIONE
retrograda



ZONA PERIORALE
retrograda



MENTO
bolo




RISULTATI¹

PAZIENTE DI 33 ANNI



PRIMA

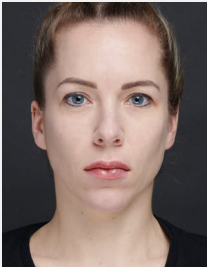

DOPO



PRIMA



DOPO

- EFFETTO LIFTING IMMEDIATO
- RICOSTITUZIONE NATURALE DELLA GEOMETRIA DEL VISO
- RIPRISTINO DELLA V SHAPE
- RISULTATO NATURALE

[1] Test clinico comparativo a lungo termine per 18 mesi con AF3 18, multicentrico presso 5 centri in Francia, 2019-2021, 98 soggetti, media 54,7 anni. Iniezione di ART FILLER® VOLUME sulle tempie (33 soggetti). Iniezione di ART FILLER® VOLUME sulla mandibola (72 soggetti). Iniezione di ART FILLER® VOLUME sulla parte mediale del viso (56 soggetti).

BIONUTRILIFT® CANNULAS



1 MICRO-CANNULA + 1 SHARP NEEDLE
20 X STERILE KITS - 25G - 55MM



UN APPROCCIO FILMED COMPLETO

RECIDE E SEPARA MECCANICAMENTE

LE FIBRE FRA LA PELLE E IL MUSCOLO

MIGLIORE TOLLERABILITÀ
cannula a punta smussata
per ridurre gli ematomi

MIGLIORE MANUALITÀ
trattamento della superficie
che consente un perfetto
scorrimento

TRATTAMENTO SIMMETRICO
graduazione centimetrica per
una profondità di iniezione
controllata

MENO FATICA
PER L'ESTRAZIONE
calibro interno più grande per
ridurre la pressione di iniezione

PRECISIONE
il punto rosso sul mozzo indica
la posizione del foro laterale per
un'iniezione precisa



I PROTOCOLLI FILLMED

Per ogni prodotto ART FILLER® è stato definito un piano di trattamento specifico per ogni zona o effetto desiderato. I piani di trattamento si traducono nei protocolli Fillmed che indicano:



1 **PRODOTTO**
O COMBINAZIONE DI
PRODOTTI DA UTILIZZARE

2 **QUANTITÀ**
E MODALITÀ DI UTILIZZO
DURANTE L'INIEZIONE

3 **TEMPI**
DEI TRATTAMENTI

ALGORITMO CLINICO PER SCEGLIERE IL PROTOCOLLO ADATTO		PROBLEMATICA	PER CHI È ADATTO?	PROTOCOLLO		PRODOTTI	FOR OGNI PROTOCOLLO UNA SKINCARE ROUTINE PERSONALIZZATA CON I PRODOTTI SKIN PERFUSION
EFFETTO LIFTING		Rughe sulle guance, mancanza di tonicità, disidratazione.	Pazienti che desiderano un trattamento rivitalizzante con effetto lifting. 30-50 anni		BIONUTRILIFT®	ART FILLER® UNIVERSAL + ART FILLER® FINE LINES + NCTF® 135 HA	
		Rughe periorali, disidratazione.	Pazienti che desiderano ringiovanire la zona periorale. 30-50 anni		BIONUTRILIPS™	ART FILLER® LIPS SOFT + NCTF® 135 HA	
RIDEFINIZIONE		Ptosi dell'ovale del viso, perdita di volume, mascolinizzazione / femminilizzazione, disidratazione.	Pazienti che desiderano rimodellare la struttura del viso, ridefinendone il profilo. 30-65 anni		BIONUTRISHAPE™	ART FILLER® VOLUME + NCTF® 135 HA	
DOMINO EFFECT		Ptosi dell'ovale del viso, perdita di volume e perdita di definizione.	Pazienti che desiderano rimodellare la struttura del viso ridefinendo l'ovale e i volumi. 30-50 anni		THE DOMINO EFFECT	ART FILLER® VOLUME	
VALORIZZAZIONE		Beautification, valorizzazione e miglioramento dei tratti del viso.	Pazienti che desiderano valorizzare la propria bellezza. 18-35 anni		MEDICAL HIGHLIGHTING	ART FILLER® UNIVERSAL	
		Viso dall'aspetto stanco, espressione negativa.	Pazienti che desiderano migliorare l'espressione del viso. 35-50 anni		2.4 PRO D-LIGHT	ART FILLER® UNIVERSAL + ART FILLER® VOLUME	

FILLMED ha sviluppato una serie di protocolli per rispondere alle esigenze di ogni paziente, dai millenials alle generazioni più mature, sia per valorizzare che per correggere.

FILLMED

E-ACADEMY

LA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE
REALIZZATA
DAI MEDICI, PER I MEDICI

CONTENUTI UTILI ALLA TUA PROFESSIONE:
anatomia, tecniche di iniezione e protocolli, prodotti,
skin quality e comunicazione con il paziente.



Visita il sito FILLMED.IT
e scopri le nostre pagine social

BOOST YOUR BUSINESS

+14K

MEDICI ISCRITTI

+60

VIDEO DISPONIBILI
ON DEMAND



Disponibile per Apple & Android
(iPhone, iPad, Smartphone e Tablet)



LA BELLEZZA È UN'ARTE,
NOI NE ABBIAMO FATTO UNA SCIENZA