

**FILLMED**  
LABORATOIRES



## BIORIVITALIZZAZIONE & PEELING

TECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLA SKIN QUALITY

# BELLEZZA AUTENTICA E SICURA

TUTTA L'ESPERIENZA DI **FILLMED**,  
IL PRIMO LABORATORIO DI MEDICINA  
ESTETICA\*

**FILLMED LABORATOIRES**, tra le aziende leader nella medicina estetica da oltre 40 anni, ha acquisito tutta la professionalità e le competenze necessarie alla conoscenza della pelle e del suo funzionamento, sviluppando prodotti per le esigenze dei pazienti e promuovendo un approccio pro-ageing olistico.

Solo poche fabbriche al mondo sono in grado di produrre soluzioni iniettabili di acido ialuronico. Un'architettura **100% su misura** per assicurare il controllo di tutti i processi.

\*Fondato nel 1978





## LA PELLE RIFLETTE SÉ STESSI

La pelle svolge un ruolo importante nel modo di apparire agli altri e a sé stessi.

La pelle è protagonista delle tendenze sociali a qualsiasi età e in qualsiasi cultura; l'aspetto esteriore influisce sulla propria autostima.

### COS'È UNA PELLE PERFETTA?

**La pelle perfetta è una pelle in buona salute**, che pur presentando eventuali tratti di espressione, nasconde in sé la chiave per una bellezza luminosa e sana.

## NCTF® 135 HA

ASPETTO GIOVANILE E RADIOSO A QUALSIASI ETÀ

### L'ESCLUSIVA FORMULA PIONIERA DEI TRATTAMENTI DI BIORIVITALIZZAZIONE.

NCTF® 135 HA è un complesso esclusivo multi-rivitalizzante che idrata il derma e apporta gli ingredienti utili alla sua vitalità mediante una tecnica di iniezione multipuntura.



**CORREGGE** I SEGNI  
DELL'INVECCHIAMENTO  
CUTANEO

**CONTRASTA** LE CAUSE  
DELL'INVECCHIAMENTO  
CUTANEO

# NCTF® 135 HA | ◉

UNA FORMULA UNICA E COMPLETA

Brevettata nel 1978 dal Medico Estetico Michel Tordjman nei Laboratoires FILLMED, **L'ESCLUSIVA FORMULA DI NCTF® 135 HA È ANCORA OGGI PIONIERA DEI TRATTAMENTI DI BIORIVITALIZZAZIONE.**

Grazie alla presenza di acido ialuronico libero e di altri nutrienti essenziali, migliora la funzionalità e la qualità della pelle e aiuta a prevenire, rallentare e correggere gli effetti dell'invecchiamento.

## ESCLUSIVA TECNOLOGIA INIETTIVA

Il dispositivo di inoculazione **NANOSOFT™** è il più piccolo ago presente sul mercato, progettato per trattare zone estremamente delicate (contorno occhi, zona periorale, collo e décolleté) e per ridurre il dolore e i rischi collegati all'iniezione.

**ACIDO IALURONICO  
+ 59 INGREDIENTI  
CON PROPRIETÀ  
DERMO-RIVITALIZZANTI**


VITAMINE  
AMINOACIDI  
CO-ENZIMI  
ACIDI NUCLEICI  
MINERALI



## PROTOCOLLO DI RINGIOVANIMENTO

Per risultati ottimali e di lunga durata, si raccomanda **un protocollo in tre fasi, con tre sedute a intervalli di 15 giorni più due sedute successive a intervalli di 30 giorni.**

Per mantenere i risultati ottenuti, si raccomanda un protocollo due volte l'anno. A seconda delle esigenze della pelle, il dottore elaborerà un protocollo personalizzato.

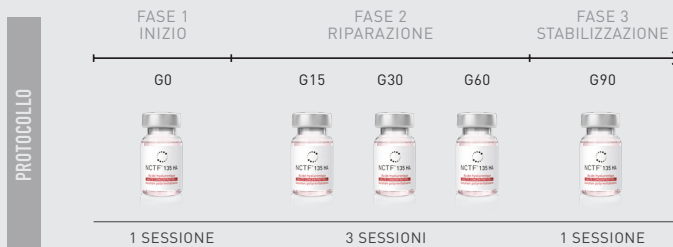


+49% RADIOSITÀ CUTANEA



PRIMA

DOPO 5 SEDUTE

-43% PROFONDITÀ DELLE ZAMPE DI GALLINA

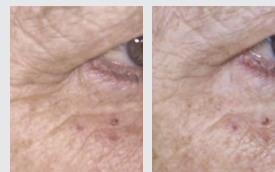

PRIMA

DOPO 5 SEDUTE

RISULTATI



1

### PER CHI È ADATTO?

NCTF® 135 HA è utilizzabile a qualsiasi età\* e per qualsiasi tipo di pelle per correggere i segni visibili dell'invecchiamento. È indicato per chi, indipendentemente dal sesso, desidera un aspetto riposato e una pelle visibilmente vitale.

2

### CHE COSA ACCADE DURANTE IL TRATTAMENTO?

NCTF® 135 HA deve essere somministrato in ambito ambulatoriale, da un medico esperto in tecniche di iniezione con multipuntura. Ogni trattamento consiste in ripetute micro-iniezioni di NCTF® 135 HA nel derma, ha una breve durata e provoca minimo dolore.

3

### A CASA

Per completare i protocolli applicati negli studi medici e assicurare alla pelle una cura quotidiana, FILLMED ha sviluppato SKIN PERFUSION, una linea cosmeceutica anti-età dalla performance eccellente.

\* Può essere utilizzato solo in età adulta, ad esclusione di donne in gravidanza e in allattamento.



## I NOSTRI RISULTATI

- +144% **RADIOSITÀ<sup>1</sup>**  
osservata nell'88% dei casi
- +132% **IDRATAZIONE<sup>1</sup>**  
osservata nell'83% dei casi
- +52% **OMOGENEITÀ<sup>2</sup>**
- 33% **RUGHE RIDOTTE<sup>2</sup>**  
osservate nel 67% dei casi
- 59% **PORI MINIMIZZATI<sup>2</sup>**

[1] Studio degli effetti delle iniezioni intradermiche ripetute di NCTF® 135 HA sulle conseguenze dell'invecchiamento cutaneo del viso, 2011. Studio aperto, multi-centrico e prospettico condotto in 25 centri. 40 pazienti coinvolti [età media: 51,5 anni] di cui 3 si sono ritirati dallo studio. Tre sedute a intervalli di 15 giorni e due sedute a intervalli di 30 giorni.

[2] Valutazione clinica dell'efficacia anti-invecchiamento della mesoterapia con NCTF® 135 HA su volontari sani, 2014. Studio aperto, mono-centrico e prospettico. 20 pazienti coinvolti [età media: 49,25 anni] di cui 2 si sono ritirati dallo studio. Tre sedute a intervalli di 15 giorni e 2 sedute a intervalli di 30 giorni.



# BEAUTIFEYE™

RINGIOVANIMENTO DELLO SGUARDO

## FASE 1 PEELING SULLA SUPERFICIE CUTANEA

Il trattamento prevede l'applicazione di BRIGHT PEEL® dei Laboratoires FILLMED che agisce sulle discromie della zona periorbitale. È adatto anche alle pelli più sensibili.

## FASE 2 MICROINIEZIONI CON NANOSOFT™

La seconda fase del trattamento prevede l'iniezione nel derma superiore della soluzione rivitalizzante di NCTF® 135 HA. Per l'iniezione è utilizzato il device NANOSOFT™ composto da tre microaghi che garantiscono un'iniezione precisa e sicura, riducendo il rischio di ecchimosi e minimizzando il dolore durante l'iniezione. **L'associazione di NCTF® 135 HA & NANOSOFT™** è indicata per le zone sensibili del viso e **fornisce risultati ottimali in minor tempo.**

## PROTOCOLLO A INTERVALLI DI 2 SETTIMANE



# TRATTAMENTO A CASA

## FASE 3 SKINCARE POST-TRATTAMENTO

Per risultati migliori, si consiglia di completare il trattamento in studio con i prodotti SKIN PERFUSION.



### B3-RECOVERY CREAM POST-TRATTAMENTO

Crema lenitiva ideale per prevenire l'insorgere di irritazioni cutanee dopo il trattamento estetico. La formula è specificatamente ideata per proteggere la pelle sensibile dalle aggressioni esterne.



### HXR-EYE CREAM APPLICARE QUOTIDIANAMENTE

Con azione ringiovanente contrasta tutti i segni d'invecchiamento cutaneo: rughe, occhiaie, borse, disidratazione.



### EYE-RECOVER MASK

USARE UNA/DUE VOLTE LA SETTIMANA  
Il suo innovativo design in patch è stato sviluppato per l'applicazione su tutto il contorno occhi per combattere i segni di stanchezza e del tempo.

## PEELING

### PER RIGENERARE LA PELLE

#### PEELING CON GLUCONOLATTONE:

UN PRINCIPIO ATTIVO DALLE  
MOLTEPLICI PROPRIETÀ

**Adatto** alla pelle sensibile.

**Antiossidante** equiparabile alla  
vitamina C e alla vitamina E.

**Igrosopico** per un'azione idratante.

**Efficace** per purificare comedoni e pori  
più altre lesioni infiammatorie come  
l'acne.

**Opacizzante e sebo regolatore** grazie  
alla sua struttura lipofila.

**Favorisce** la funzione di barriera dello  
strato corneo.

**Non fotosensibilizzante.**



## LINEA PEELING PROFESSIONALI

UNA PELLE NUOVA CON  
IL GLUCONOLATTONE

Il gluconolattone è una forma lattonica dell'acido gluconico (PHA) derivata dal glucosio per bio-ossidazione. Una struttura chimica ciclizzata per un'azione cheratolitica che offre la medesima efficacia degli acidi AHA, ma con una tolleranza maggiore anche per le pelli più sensibili.

Abbinato ad altri principi attivi, il gluconolattone potenzia l'effetto terapeutico, migliorando la tolleranza e il risultato estetico globale.



# UN'AZIONE MIRATA PER OGNI ESIGENZA

GRAZIE AD ACIDI SPECIFICI



**TIME PEEL®**  
Rughe  
Mancanza di compattezza



**BRIGHT PEEL®**  
Macchie  
Incarnato disomogeneo



**LIGHT PEEL®**  
Rughe sottili  
Mancanza di luminosità

## PROTOCOLLO MEDICO

1



### PREPARAZIONE DELLA PELLE

Proteggere le parti sensibili (occhi, mucose). **Applicare FILLMED PRE PEEL** uniformemente sulla parte da trattare con l'aiuto di cotone o di una compressa di garza per abbassare il pH cutaneo a 4.

2



### APPLICAZIONE DEL PEELING

Con l'aiuto del pennello, la **soluzione esfoliante è distribuita su tutta la zona da trattare.**

Nella prima seduta, lasciare agire 3 minuti e aumentare progressivamente i tempi di azione secondo il livello di tolleranza riscontrato.

Durante il tempo di posa, **controllare l'evoluzione della pelle della paziente.**

3



### NEUTRALIZZAZIONE

**Applicare FILLMED POST PEEL** con del cotone o una compressa di garza. Ripetere l'applicazione se necessario. Sciacquare con acqua. Asciugare la pelle. Applicare il prodotto lenitivo B3 RECOVERY CREAM di SKIN PERFUSION BY FILLMED.



DURANTE LE 4 SEDUTE DI PROTOCOLLO,  
È POSSIBILE ABBINARE I PEELING FRA LORO.





TIME PEEL®



**RUGHE E COMPATTEZZA**

PELLE NORMALE

#### FORMULA

pH ≈ 1,2

Con acido glicolico: cheratolitico e stimolante del rinnovamento cutaneo.

#### RISULTATI<sup>1</sup>

**100%** INCARNATO RADIOSO  
**90%** ASPETTO RINGIOVANITO  
**91%** PELLE PIÙ LISCIA  
**85%** PELLE RASSODATA

[1] Auto-valutazione - percentuale di soddisfazione dei consumatori - 33 volontari - età media 56 anni. Risultati ottenuti dopo 4 applicazioni a intervalli di 14 giorni, per un complessivo di 56 giorni, utilizzando il peeling chimico composto dai prodotti PRE PEEL, TIME PEEL® e POST PEEL.



BRIGHT PEEL®



**MACCHIE E LUMINOSITÀ**

PELLE NORMALE

#### FORMULA

pH ≈ 1,5

Con acido fitico, acido citrico e acido glicolico: inibitore della tirosinasi ad azione sbiancante in superficie.

#### RISULTATI<sup>2</sup>

**93%** PELLE PIÙ LUMINOSA  
**93%** PELLE PIÙ LISCIA  
**78%** INCARNATO OMOGENEO  
**75%** MACCHIE SCURE RIDOTTE

[2] Auto-valutazione - percentuale di soddisfazione dei consumatori - 41 volontari - età media 47 anni. Risultati ottenuti dopo 4 applicazioni a intervalli di 14 giorni, per un complessivo di 56 giorni, utilizzando il peeling chimico composto dai prodotti PRE PEEL, BRIGHT PEEL® e POST PEEL.



LIGHT PEEL®



**RUGHE SOTTILI E LUMINOSITÀ**

PELLE SENSIBILE

#### FORMULA

pH ≈ 3

Con acido mandelico: cheratolitico con buona tolleranza

#### RISULTATI<sup>3</sup>

**97%** PELLE PIÙ RADIOSA  
**97%** IDEALE PER LE PELLI SENSIBILI  
**84%** RUGHE D'ESPRESSIONE ATTENUATE

[3] Auto-valutazione - percentuale di soddisfazione dei consumatori - 32 volontari - età media 47 anni. Risultati ottenuti dopo 4 applicazioni a intervalli di 14 giorni, per un complessivo di 56 giorni, utilizzando il peeling chimico composto dai prodotti PRE PEEL, LIGHT PEEL® e POST PEEL.



**PRE PEEL**

PREPARAZIONE AL PEEING

#### PRINCIPI ATTIVI

Gluconolattone: prepara la pelle e abbassa il pH cutaneo.

PH ≈ 4



**POST PEEL**

TRATTAMENTO  
NEUTRALIZZANTE E LENITIVO

#### PRINCIPI ATTIVI

Bicarbonato di sodio: neutralizza l'azione degli acidi.

Solfato di destrano: lenisce la pelle

PH ≈ 8



# TIMELINE

## DI UN TRATTAMENTO ESTETICO

### -15 GIORNI

#### PIANIFICARE UN INCONTRO MEDICO-PAZIENTE.

È fondamentale spiegare qual è l'effetto che si desidera ottenere. Il medico suggerirà il trattamento più idoneo per valorizzare il viso e mostrerà i benefici ed eventuali rischi correlati.

### IL GRANDE GIORNO

#### IL GIORNO DEL TRATTAMENTO.

Non applicare make-up nelle 12 ore successive all'iniezione. Evitare il contatto con la zona trattata, l'esposizione al sole e ai raggi UV, nelle due settimane successive all'iniezione.

### 15 GIORNI

#### ESSERE CONTENTI DEL PROPRIO ASPETTO.

Gli effetti ottenuti possono avere una durata variabile a seconda dello stile di vita e della zona trattata.

### -3 GIORNI

#### PREPARARSI AL TRATTAMENTO.

Tre giorni prima dell'iniezione, è necessario seguire le istruzioni del medico.

### 2-4 GIORNI

#### REAZIONI LOCALI.

Dopo il trattamento, potrebbero manifestarsi delle reazioni locali (gonfiori, ecchimosi, dolore) che potrebbero protrarsi per un paio di giorni: è **normale**.

Visita il sito [FILLMED.IT](https://fillmed.it)  
e scopri le nostre pagine social



Fillmed Italia



@fillmed\_italia



LA BELLEZZA È UN'ARTE,  
NOI NE ABBIAMO FATTO UNA SCIENZA

Materiale ad esclusivo uso medico.